

## ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

### Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!



1. wejdź na stronę <https://wyniki.diag.pl>,
2. wybierz POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA  
oraz DATĘ URODZENIA

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:

 **695 235 299**

 e-mail: [kontakt@nowagenetyka.pl](mailto:kontakt@nowagenetyka.pl)



## BADANIE LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

### INSTRUKCJA POBRANIA wymazu do badań genetycznych z błony śluzowej policzka

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania genetycznego.

Zestaw pozwala na szybkie i bezbolesne pobranie wymazu z błony śluzowej policzka, z którego zostanie wyizolowany materiał genetyczny.

#### SKŁAD ZESTAWU:

- wymazówka (pałeczka z aplikatorem),
- rękawiczki,
- papierowo-foliowa torebka osuszająca,
- dwa kody kreskowe do naklejenia na probówkę i torebkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- e-voucher,
- deklaracja świadomej zgody na badanie genetyczne,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.



## PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:


1. 2-3 godziny przed pobraniem nie należy spożywać pokarmów, napojów, lizaków, cukierków, żuć gumy itp., palić papierosów, używać środków do higieny jamy ustnej.
2. Bezpośrednio przed pobraniem zaleca się przepłukanie jamy ustnej wodą.
3. Małe dzieci mogą ssać smoczek, pod warunkiem, że jest on używany wyłącznie przez jedno dziecko (smoczek nie jest wkładany do ust przez matkę czy inne osoby).

## INSTRUKCJA POBRANIA WYMAZU:

**UWAGA:** Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach dołączonych do zestawu.




1. Umyj ręce i włóż rękawiczki.

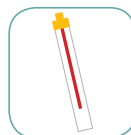

2. Wyjmij wymazówkę (pałeczkę z aplikatorem) z foliowego opakowania.




3. Naklej indywidualny kod kreskowy wzdłuż plastikowej próbki ochronnej oraz podpisz ją imieniem i nazwiskiem osoby od której pobierany jest wymaz.

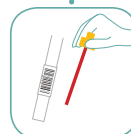


4. Trzymając za żółty korek wyjmij wymazówkę z próbki ochronnej uważając aby koniec wymazówki nie dotknął żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz  
**Uwaga: nie wyrzucaj próbki ochronnej!**



5. Pobierz wymaz pocierając zdecydowanym płynnym ruchem obrotowym obie strony wewnętrznej części policzków (ok. 10 obrotów na jeden policzek).

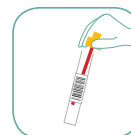

6. Ostrożnie umieść wymazówkę w podpisanej i okodowanej próbce ochronnej uważając aby koniec wymazówki nie dotknął żadnej przypadkowej powierzchni.

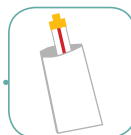

7. Umieść próbkę w papierowo - foliowej torebce osuszającej i zaklej ją.



8. Na zaklejonej papierowo- foliowej torebce naklej drugi kod kreskowy.



9. Umieść wszystko w pudełku. **Pamiętaj**, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą pobrania, deklaracja świadomej zgody na badanie genetyczne oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.

10. Pudełko wyślij najpóźniej w następnym dniu roboczym po pobraniu. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj je w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i ciepła.

## ODEŚLANIE ZESTAWU:

**80 dni**

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest **ważny 80 dni roboczych od daty wystawienia**.



Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

Wejźdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>  
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”. Przesyłka jest opłacona.



Wysyłka powinna nastąpić w dniach **poniedziałek - piątek**. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.