

## Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: [wyniki.diag.pl](https://wyniki.diag.pl)
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

### Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium.

### Zachowaj go!

Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



**695 235 299**



[kontakt@nowagenetyka.pl](mailto:kontakt@nowagenetyka.pl)

# Diagpack



## Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

### Instrukcja pobrania

Diagnostyka zakażeń  
urogenitalnych

Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego. Test pozwala na szeroką diagnostykę chorób przenoszonych drogą płciową, tzw. STD (ang. sexually transmitted diseases) lub STI (ang. sexually transmitted infections).

### Skład zestawu:

- probówka wypełniona buforem wraz z jednomiarową pipetą,
- pojemnik do pobrania moczu,
- rękawiczki,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



## Diagnostyka+

[diagnostyka.pl](https://diagnostyka.pl)

## Przed pobraniem:

1. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
2. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc na adres mailowy: [diagpack@diag.pl](mailto:diagpack@diag.pl)
3. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.  
W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

**UWAGA!** Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku i koniecznością zakupu nowego zestawu na koszt pacjenta.



## Odeślanie zestawu

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

**UWAGA:** Nie rekomendujemy odosłania przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

## Instrukcja pobrania wymazu:

Przed pobraniem próbki moczu należy ograniczyć zabiegi higieniczno - pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych.

- Pacjent nie powinien oddawać moczu co najmniej godzinę przed pobraniem próbki.



Dokładnie umyj ręce i załóż rękawiczki.



Pobierz pierwszych 20 do 30 ml świeżo oddanego moczu (pierwsza część strumienia) do pojemnika na mocz.



Odkręć zakrętkę próbówki transportowej z zestawu pobraniowego uważając, by nie rozlać znajdującego się w środku buforu, ostrożnie obchodź się z zakrętką i próbówką, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia w tym również zewnętrznej powierzchni próbówki transportowej oraz zakrętki.



Przy użyciu plastikowej pipety jednomiarowej przelej mocz z pojemnika do próbówki transportowej tak, aby poziom moczu w próbówce był widoczny w okienku z podziałką na etykiecie próbówki. Do przeniesienia odpowiedniej objętości moczu wystarczy niewiele ponad jedno pełne ściśnięcie pipety jednomiarowej.



Probówka nie może zostać przepelniona. Ostrożnie zamknij próbówkę przy pomocy zakrętki, upewnij się, czy zakrętka jest mocno zakręcona.



Probówkę czytelnie opisz imieniem i nazwiskiem pacjenta, rodzajem materiału „Mocz” oraz datą pobrania. Naklej kod kreskowy wzdłuż próbówki (uważaj, aby nie zasłonić okienka wskazującego poprawny poziom płynu w próbówce). 20-30 ml



Umieść probówkę w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione oświadczenie opisane datą pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału. Nie odsyłaj Instrukcji pobrania, znajduje się na niej Twój unikalny kod do odbioru wyniku.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.