

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: wyniki.diag.pl
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium.

Zachowaj go!

Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



695 235 299



kontakt@nowagenetyka.pl

Diagpack



Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

Instrukcja pobrania

Infekcje układu pokarmowego
badanie molekularne met. Real Time PCR

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału do badania molekularnego. Test pozwala na szybką i czułą diagnostykę infekcji układu pokarmowego w jednej próbce kału.

Skład zestawu:

- probówka wraz z wymazówką,
- rękawiczki,
- biodegradowalna podkładka toaletowa,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.



Diagnostyka+

diagnostyka.pl

Przed pobraniem:

1. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
2. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
3. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE. W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożnością uzyskania wyniku i koniecznością zakupu nowego zestawu na koszt pacjenta.

Odesłanie zestawu

W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 80 dni od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróc paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

UWAGA: Nie rekomendujemy odnoszenia przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Instrukcja pobrania wymazu:

Materiał do badań należy pobrać możliwie jak najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów i jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Przy nawracających biegunkach materiał należy pobrać w okresie występowania objawów.

W przypadku badania: *Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów met. Real Time PCR, jakościowo*, materiał do badań należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia przeciwpasożytniczego oraz włączeniem preparatów zawierających wiązki baru, bizmutu i magnezu. W przypadku ich stosowania należy odczekać minimum 1 tydzień. Po zakończonej terapii antybiotykami należy odczekać 2 tygodnie.



Oddaj kał na podkładkę toaletową naciągniętą na deskę sedesową.



Umyj ręce i załóż rękawiczki.



Delikatnie odkręć probówkę, uważaj aby nie dotknąć końcówką wymazówki żadnej przypadkowej powierzchni. Umieść końcówkę wymazówki w kale, w miarę możliwości przeciągnij wymazówkę po całej długości kału, a następnie delikatnie przenieś ją do podłoża płynnego znajdującego się w probówce.

UWAGA! Pobierz wymaz z kału, nie wkładaj kału do próbki! Jeśli materiału będzie zbyt wiele w stosunku do płynu, konieczne będzie ponowne pobranie próbek!

Odłam końcówkę wymazówki w miejscu zaznaczonym na czerwono. Wymazówka będzie wystawać poza probówkę.



Zakręć probówkę, wystająca, elastyczna wymazówka wygnie się w niej. Obracaj probówkę góra-dół przez ok. 1 min.



Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania kału. Naklej na probówce - wzdłuż próbki - naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym dołączonym do zestawu.



Umieść probówkę w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE opisane datą pobrania oraz e-voucher otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału. Nie odsyłaj Instrukcji pobrania, znajduje się na niej Twój unikalny kod do odbioru wyniku.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.