

ODBIERZ WYNIKI ON-LINE

NUMER ZLECENIA

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!



1. wejdź na stronę <https://wyniki.diag.pl>,
2. wybierz „POJEDYNCZE ZLECENIE
3. wpisz NUMER ZLECENIA
oraz DATĘ URODZENIA

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:

 **695 235 299**

 e-mail: kontakt@nowagenetyka.pl



Infekcje
układu
pokarmowego

BADANIE LABORATORYJNE DO SAMODZIELNEGO POBRANIA

INSTRUKCJA POBRANIA

Infekcje układu pokarmowego badanie molekularne met. Real Time PCR

Przekazujemy Państwu zestaw umożliwiający samodzielne pobranie w zaciszu domowym materiału do badania molekularnego. Test pozwala na szybką i czułą diagnostykę infekcji układu pokarmowego w jednej próbce kału.

SKŁAD ZESTAWU:

- probówka wraz z wymazówką,
- rękawiczki,
- biodegradowalna podkładka toaletowa,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.



PRZED ROZPOCZĘCIEM POBRANIA:

- Materiał do badań należy pobrać możliwie jak najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów i jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Przy nawracających biegunkach materiał należy pobrać w okresie występowania objawów.
- W przypadku badania: *Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów met. Real Time PCR, jakościowo*, materiał do badań należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia przeciwpasożytniczego oraz włączeniem preparatów zawierających związki baru, bizmutu i magnezu. W przypadku ich stosowania należy odczekać minimum 1 tydzień. Po zakończonej terapii antybiotykami należy odczekać 2 tygodnie.

- Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
- Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, **nie używaj zestawu** skontaktuj się pisząc na adres mailowy: **diagpack@diag.pl**
- Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
- W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.

INSTRUKCJA POBRANIA:



1. Oddaj kał na podkładkę toaletową naciągniętą na deskę sedesową.




2. Umyj ręce i załóż rękawiczki.



3. Delikatnie odkręć probówkę, uważaj aby nie dotknąć końcówką wymazówki żadnej przypadkowej powierzchni. Umieść końcówkę wymazówki w kale, w miarę możliwości przeciągnij wymazówkę po całej długości kału, a następnie delikatnie przenieś ją do podłoża płynnego znajdującego się w probówce.

UWAGA! Pobierz wymaz z kału, nie wkładaj kału do probówki! Jeśli materiału będzie zbyt wiele w stosunku do płynu, konieczne będzie ponowne pobranie próbki!

Odłam końcówkę wymazówki w miejscu zaznaczonym na czerwono tak aby można było zamknąć probówkę.

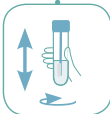

4. Zakręć probówkę i obracaj góra-dół przez ok. 1 min.



5. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania kału. Naklej na probówce - **wzdłuż probówki** - naklejkę z indywidualnym kodem kreskowym dołączonym do zestawu.



6. Umieść probówkę w pudełku. **Pamiętaj**, że do pudełka musi zostać **dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE opisane datą pobrania oraz e-voucher** otrzymany wraz z zestawem do pobrania materiału.

Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 24h od momentu pobrania próbki).

Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.

ODEŚLANIE ZESTAWU:

80 dni

W zestawie znajduje się zwrotny list przewoźny, który jest **ważny 80 dni roboczych od daty wystawienia**.



Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę” **Przesyłka jest opłacona.**



Wysyłka powinna nastąpić w **dniach poniedziałek - piątek**. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.