

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: <https://wyniki-papgen.diag.pl/>
- + wpisz kod zlecenia
- + podaj datę wypełnienia zamówienia

Kod kreskowy/Kod Twojego zlecenia:

Uwaga! Kod zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium. Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

Diagpack

Wysyłkowe badanie laboratoryjne

nazwa
badania:

**Badanie kleszcza
borrelia burgdorferi
DNA met. real time PCR**

Instrukcja przygotowania kleszcza do wysyłki

Przekazujemy Państwu zestaw transportowy umożliwiający przesłanie kleszcza do laboratorium.

W kleszczu usuniętym z miejsca wkłucia, oceniana jest obecność DNA bakterii wywołujących boreliozę: *B. burgdorferi sensu stricto*, *B. andersoni*, *B. bissetti*, *B. garini*, *B. afzeli*, *B. valaisiana*, *B. lusitaniae*, *B. japonica*, *B. tanukii*, *B. turdi*, *B. sinica*.

Skład zestawu:

- jałowy pojemnik na kleszcza,
- pęseta jednorazowa,
- woreczek strunowy,
- formularz zamówienia,
- e-voucher,
- instrukcja przygotowania kleszcza do wysyłki,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa.

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



663 680 217



papgen@diag.pl



Diagnostyka S.A.

Pracownia Analiz Profili Genetycznych
ul. Opolska 131A, 52-013 Wrocław,
tel. 663 680 416, e-mail: papgen@diag.pl

Przed wysyłką:

1. Sprawdź kompletność zestawu. Jeśli brakuje w nim któregoś z elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu.
2. Skontaktuj się pisząc na adres e-mail: diagpack@diag.pl
3. Wypełnij formularz zamówienia i podpisz go w prawym dolnym rogu.



Odeślanie zestawu

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek.

Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Przygotowanie kleszcza do wysyłki



Umyj ręce.



Umieść kleszcza w jałowym, zakręcanym pojemniku, za pomocą dołączonej do zestawu pęsety.



Pojemnik z kleszczem umieść w woreczku strunowym.



Wypełnij i podpisz formularz zamówienia.



Umieść wszystko w pudełku. Pamiętaj, że do pudełka musi zostać dołączone dokładnie wypełnione OŚWIADCZENIE oraz e-voucher.



Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze 2-8°C.