

Odbierz swoje wyniki on-line

- + wejdź na stronę: wyniki.diag.pl
- + wybierz /pojedyncze zlecenie/
- + wpisz numer zlecenia
- + podaj datę urodzenia

Kod kreskowy/numer Twojego zlecenia:

Uwaga!

Numer zlecenia jest unikalny i służy do identyfikacji Twojego badania w laboratorium.

Zachowaj go!

Będzie Ci potrzebny do odbioru wyników online!

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami:



695 235 299



kontakt@nowagenetyka.pl

Diagpack



Badanie laboratoryjne do samodzielnego pobrania

Instrukcja pobrania

Diagnostyka intymnych
infekcji grzybiczych



Przekazujemy Państwu zestaw pobraniowy, umożliwiający samodzielne pozyskanie materiału do badania laboratoryjnego. Test pozwala na szybką diagnostykę infekcji urogenitalnych wywołanych przez grzyby z rodzaju Candida.

Skład zestawu:

- wymazówka,
- podłoże stabilizujące materiał,
- rękawiczki,
- kod kreskowy do naklejenia na probówkę,
- oświadczenie i potwierdzenie danych osobowych,
- instrukcja pobrania,
- zwrotna koperta i etykieta wysyłkowa,
- e-voucher.



Diagnostyka+

diagnostyka.pl

Przed pobraniem:

1. Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
2. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu, skontaktuj się pisząc na adres mailowy: diagpack@diag.pl
3. Wypełnij i podpisz w prawym dolnym rogu OŚWIADCZENIE.
W przypadku osoby niepełnoletniej, OŚWIADCZENIE podpisuje opiekun prawny.

UWAGA! Zestaw jest wyłącznie do jednorazowego użytku.
Nieprawidłowe pobranie materiału może skutkować niemożliwością uzyskania wyniku.



W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest **ważny 80 dni** od daty wystawienia.

Wysyłka kurierem DHL przy użyciu koperty z etykietą zwrotną:

Zapakuj zestaw w załączoną kopertę oklejoną etykietą zwrotną DHL.

- + Wejdź na stronę <https://dhl24.com.pl/zwroty/>
- + Wpisz numer przesyłki z etykiety zwrotnej, następnie kliknij ikonkę „zwróć paczkę”
- + Przesyłka jest opłacona.

UWAGA: Nie rekomendujemy odosłania przesyłki do Punktów Obsługi Paczek.

Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek - piątek. Nie powinna być nadawana przed dniami świątecznymi.

Instrukcja pobrania wymazu:

Materiał należy pobrać co najmniej po 7 dniach od zakończenia antybiotykoterapii i/lub leczenia środkiem o działaniu miejscowym.


Przez 24 godziny przed pobraniem należy ograniczyć zabiegi higieniczne narządów płciowych oraz zachować 2 dniową wstrzemięźliwość seksualną. Nie należy pobierać materiału w trakcie krwawienia miesięczkowego.



Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
Naklej kod kreskowy wzdłuż probówki.



Umyj ręce i załóż rękawiczki.

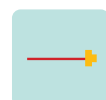


Delikatnie otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym uważając, aby nie dotknąć wymazówki.

Wprowadź wymazówkę do pochwy na głębokość ok. 5 cm, a następnie obracając kilkakrotnie wymazówką pocieraj ściany i tylne sklepienie pochwy, przez 10-30 sekund.



Ostrożnie przenieś wymazówkę do podłoża znajdującego się w probówce.

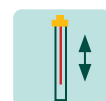

Odłam końcówkę wymazówki w miejscu zaznaczonym na czerwono. Wymazówka będzie wystawać poza probówkę. Zakręć probówkę, wystająca, elastyczna wymazówka wygnie się w niej. Obracaj probówkę góra-dół przez ok. 1 min.



Zdejmij i wyrzuci rękawiczki, a następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.



Probówkę z pobranym materiałem należy niezwłocznie przesać do laboratorium.



Wyślij materiał do laboratorium niezwłocznie. Do czasu odbioru przesyłki przez kuriera przechowuj ją w temperaturze pokojowej z dala od źródeł światła i ciepła.